

HASZNÁLATI UTASÍTÁS INFRAVÖRÖS DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ



Köszönjük hogy WELL terméket választott. Kérjük olvassák el figyelmesen az alábbi utasításokat és tartsák kézükben őket.

Model: THERM-IR-VITAL-WL (FT-100B)

Az érintkezés nélküli homlokon mérő hőmérő infravörös érzékelő segítségével méri az emberi test hőmérsékletét minden életkorú ember számára. Működése a homlokról származó természetes hősugárzás mérésén alapul.

Szabványok: Hivatkozás az EN12470-5: 2003 klinikai hőmérők szabványára - 5. rész: Infravörös fülhőmérők teljesítménye és ASTM E 1965-98: Infravörös hőmérők szabványos specifikációja a beteg hőmérsékletének időszakos meghatározásához.

Mérési tartomány: 32.0°C~42.9°C

Pontosság: ±0.3°C (32.0°C ~ 42.9°C)

Működési környezet:

Hőmérséklet: 10°C~40

Páratartalom: ≤85%RH

Légnyomás: 700~1060hPa

Magasság: <3000m

Tárolási és szállítási feltétel:

Hőmérséklet: -20 °C ~ 55 °C


Páratartalom: ≤93% relatív páratartalom

A kijelző felbontási hőmérséklettartománya: 0.1 °C

3 számjegyű folyadékkristályos kijelző

Hőmérsékleti egység: °C

Memória megjelenítése: utolsó 10 memória

Alacsony elemfeszültség figyelmeztetés: az LCD kijelzőn 

Fogyasztás: ≤30mW

Működtetés: 1 x CR2032 gomb elemmel (a csomag nem tartalmazza)

Az elem élettartama: több mint 2500 mérés 1x CR2032-elemmel

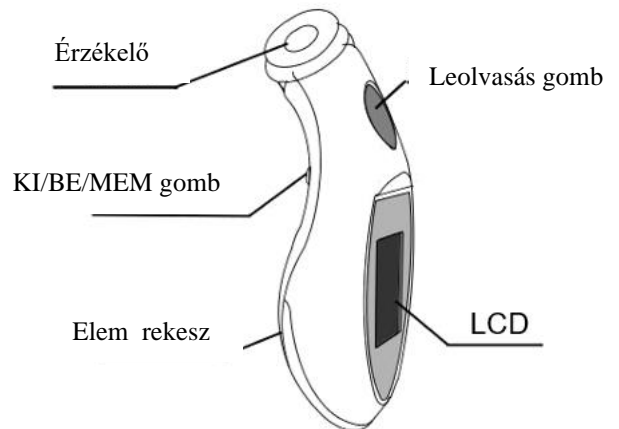
Méret: 105mm x 35mm x 35mm

Nettó súly: 36g

Hangjelzés: be / kikapcsolás, mérés befejezése stb.




Önellenőrzési teszt: Nyomja meg a " **BE / KI / MEM** " gombot a hőmérő bekapcsolásához, és az összes szimbólum (lásd A ábra) egy másodperc alatt megjelenik az LCD-n.

Kalibrálási gyakoriság: Magán használat esetén nincs szükség kalibrálásra. Szakmai használatra ajánlott évente egyszer ellenőrizni.





Figyelmeztetések

1. A mérés előtt a hőmérőt működési körülményeknek megfelelően legalább 30 percig stabilizálni kell.
2. Ne tegye ki a hőmérőt áramütésnek.
3. Ne módosítsa semmi képpen ezt az eszközt.
4. Ne tegye ki a hőmérőt napfénynek, és ne merítse vízbe.
5. Ne használja erős elektromágneses mezők közelében, tartsa távol rádiórendszerektől vagy mobiltelefonoktól.
6. Tárolja tiszta, száraz helyen.
7.  Az áramütés elleni védelem szempontjából BF típusú termék
8.  Az akkumulátor és a hibás termék, hulladék leadásának & begyűjtésének meg kell felelnie a helyi környezeti követelményeknek.
9.  A termék akkumulátorának meg kell felelnie a 2006/66 / EEC európai irányelveknek.
10. Ez az eszköz apró alkatrészeket tartalmaz, ne lélegezze be és ne nyelje le őket.
11. Óvja a terméket az erőteljes ütésektől, ne ejtse le, ne lépjen rá és ne tegye ki rázkódásoknak.
12. Tartós láz esetében, különösen gyermekeknél, orvosi kezelést kell igénybe venni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot orvosával!

Használat

1. Nyomja meg az 'ON/OFF' KI/BE kapcsoló gombot a lázmérő bekapcsolásához, egy Bipp hangjelzést fog hallani, és az LCD kijelzőn egy másodperc alatt az A. ábra szerinti kép jelenik meg. Amikor az LCD-kijelzőn a B. ábra szerinti kép jelenik meg, a termék használatra készen áll.



Fig A

Fig B

2. Irányítsa az érzékelőt a homlok felé, (1-3) cm távolságból, nyomja meg a „SCAN” gombot, majd engedje el. Sípoló hang jelzi mikor a mérés befejeződött, ekkor távolítsa el a hőmérőt. A kijelzőn a mért hőmérséklet látható.

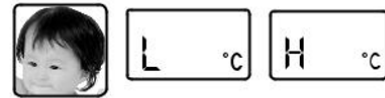


Fig C

Fig D

Megjegyzés: A C ábrán látható L betű a kijelzőn azt mutatja, hogy a mért hőmérséklet alacsonyabb, mint a normál mérési tartomány. A D ábrán látható H betű a kijelzőn azt mutatja, ha a mért hőmérséklet magasabb mint a normál mérési tartomány.

3. **Memória keresés:** nyomja meg a 'MEM' gombot, az utolsó mért érték megjelenítéséhez, a kijelzőn megjelenik az utoljára mért hőmérséklet, ahogy az F ábra mutatja. A termék lehetővé teszi az utolsó 10 mérés értékeinek megtekintését.

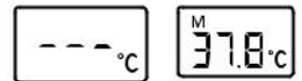


Fig E

Fig F

4. **Új mérés:** újabb mérés esetén, ismétlje meg az 1. és a 2. lépést.

Megjegyzés: Az egyes olvasások közötti idő nem lehet kevesebb, mint 1 perc.

5. Az LCD kijelzőn a G. ábra szerinti Error Er hiba üzenet jelenik meg, abban az esetben mikor a hőmérsékletet a mérési tartományon kívül van.

Megjegyzés: A mérés előtt a hőmérőt stabilizálni kell környezeti állapotban legalább 30 percig.

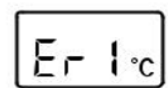
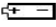








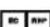





Fig G

6. Kikapcsolás: ha nem használja, a hőmérő automatikusan kikapcsol 1 perc elteltével. Manuális kikapcsolás: nyomja meg az 'ON / OFF' gombot kb. 4 másodpercig a hőmérő kikapcsolásához.

Szimbólumok magyarázata

	Alacsony elem feszültség
	Elektronikus eszközökre vonatkozó ártalmatlanítási utasítások
	A termék akkumulátorának meg kell felelni a 2006/66 / EEC európai irányelveknek.
	BF típusú termék
	Memória
	A hőmérséklet 32°C alatt van
	A hőmérséklet 42°C fölött van
	Olvassa el figyelmesen
	Lot szám
	Meghatalmazott EU képviselő
	Gyártó
	CE megfelelőségi jelölés
	Osztályozás a víz behatolása elleni védelem mértéke szerint

Tisztítás és tárolás

1. Tárolja a hőmérőt száraz, por és szennyeződésektől mentes helyen, tartsa távol a közvetlen napfénytől. A tárolási hőmérséklet: -20 C és 55 ° C között.
2. Használjon alkohollal (70% izopropil) megnedvesített törlőkendőt a hőmérő ház tisztításához. Ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a hőmérő belsejébe.
3. Tilos súrolószer, hígító vagy benzin használata a tisztításhoz, ugyanakkor soha ne merítse a hőmérőt a vízbe vagy más tisztító folyadékba. Tisztításkor ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a kijelző felületét.

Az elemek cseréje

1. Alacsony elem feszültség esetén, az LCD kijelzőn megjelenik a "⚡" szimbólum, ekkor, kérjük, cserélje ki az elemeket újakkal. A hőmérő nem fog pontosan működni alacsony feszültség esetén.
2. Távolítsa el az elemtartó fedelét, és vegye ki a régi elemet.
4. Helyezze be az új elemet a „+” / „-” polaritás figyelembe vételével.
5. Vegye ki az elemeket az elemek szivárgásának elkerülése érdekében, ha a terméket három hónapnál hosszabb ideig nem használja.
6. Az akkumulátor és a termék hulladék begyűjtésének meg kell felelnie a helyi környezetvédelmi követelményeknek.



Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town,
Yuhang District ,Hangzhou, Zhejiang 310023 China



Shanghai International Holding Corp.
GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany
E-Mail: shholding@hotmail.com
Tel.: 049-40-2513175 Fax.:049-40-255726



Ökológikus információ: A hasznalt elektromos es elektronikus keszulekek specialis hulladek kategoriaba tartoznak, begyujtesuk, tarolasuk es ujrafeldolgozasuk fontos, ezalltal elkerulhetjuk az uveghaz hatast okozo gazok vagy nehezfemek alltal okozott kornyezeti szennyezodest, melyek artalmasak az emberi egeszsegre es testi epsere. Ez okbal kifolyalag kerjuk a hasznalt elektromos es elektronikus keszulekeket, berendezeseket, leadni az erre a celra létrehozott specialis hulladek gyujto kozpontokba, ezalltal hozzajarulvan a helyes ujrhasználási folyamathoz, oltalmazvan kornyezetunket es eroforrasainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus keszulek amely a hulladek lerakohoz, a foldre , vagy a viz partjara kerul szennyezi a kornyezetet!



Beszállító és forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS Kft.

Egyéni nyilvántartási kód: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca),

Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro